

1 INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA D'USO RAPIDO



Con questa Guida d'uso rapido non si intende sostituire il manuale d'uso. La lettura dell'intero manuale d'uso prima dell'utilizzo del dispositivo è obbligatoria!
Alcune delle seguenti funzioni possono variare a seconda delle impostazioni personalizzate.

2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

- ✓ **Accensione:** premere il **Tasto anteriore** nella parte anteriore del touchTymp MI 24/MI 26 per accendere il dispositivo o per riattivarlo dalla modalità di standby. Le opzioni per la modalità di standby possono essere modificate nel menu **Impostazioni**.
- ✓ **Spegnimento:** premere il **Tasto anteriore** anche per lo spegnimento. Comparirà la scelta fra *Spegnimento* o *Standby*.



3 USO DELLA SCHERMATA



Spiegazione delle icone sulla barra di stato, barra degli strumenti e barra delle funzioni fissa.

Barra di stato			Stato della connessione con il PC: verde evidenziato se il touchTymp MI 24/MI 26 è collegato al PC e se è in funzione il software del modulo dell'Impedenza.
Barra degli strumenti	Schermata di test		Cancellare: per cancellare i dati attualmente misurati.
			Trasferimento al PC: per trasferire i dati attualmente misurati.
			Stampare: per stampare i risultati di tutti i test completati e di tutti i toni della sonda.
			Orecchio: per selezionare un orecchio per il test o per ripetere la misurazione sullo stesso orecchio (rosso = orecchio destro, blu = orecchio sinistro).
			Avviare, Arrestare, Pausa: per avviare, arrestare o mettere in pausa una misurazione.
	Schermata delle impostazioni		Predefinito: per ritornare alle impostazioni di fabbrica.
			Salvare: per salvare le impostazioni.
Barra delle funzioni fissa			Home: per selezionare il modulo di test.
			Timpanometria: per aprire il modulo di timpanometria.
			Timpanometria e riflessi acustici: per aprire il modulo di timpanometria e riflessi acustici.
			Impostazioni: per accedere all'elenco di tutte le impostazioni del dispositivo.

4 SCELTA DELLA MISURAZIONE

La schermata del test può essere raggiunta dalla schermata **Home**   o premendo i tasti nella barra delle funzioni fissa: **Timpanometria**  e **Timpanometria e riflessi acustici** .


5 INDICAZIONE DI STATO DEL TEST

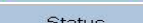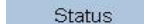SONDA	SCHERMATA	INFORMAZIONI
	Status Ready 	È stato selezionato l'orecchio destro. La sonda si trova fuori dall'orecchio.
	Status Ready 	È stato selezionato l'orecchio sinistro. La sonda si trova fuori dall'orecchio.
	Status In Ear  Status Testing  Status Done 	La sonda è nell'orecchio e si trova stabilmente, il test è in esecuzione o il test è terminato.
	Status Blocking  Status Leaking 	La sonda è nell'orecchio ed è bloccata o ha perdite.
Nessuna luce	Status No Probe  Status Unknown 	La sonda non è attaccata correttamente o non c'è il tono sonda.


6 FUNZIONAMENTO E VALUTAZIONE DEL TEST TIMPANOMETRICO E DEL TEST DEI RIFLESSI ACUSTICI

Una misurazione timpanometrica viene eseguita prima di ogni test dei riflessi acustici, per trovare la massima cedevolezza della pressione per avere il migliore funzionamento.

Test timpanometrico

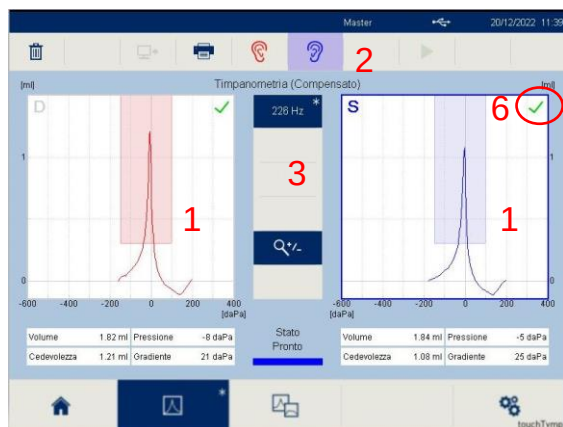

Test timpanometrico e test dei riflessi acustici

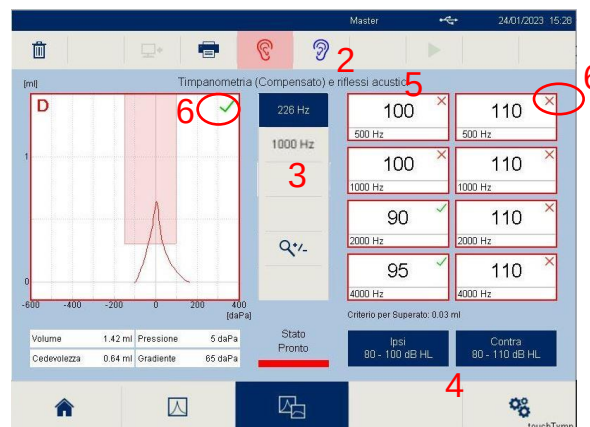

Scegliere l'orecchio da testare

- ✓ Premere sul timpanogramma corrispondente (1), sui tasti dell'orecchio (2) o il tasto sulla sonda (rosso = orecchio destro, blu = orecchio sinistro).

Scegliere la frequenza per il test

- ✓ **Test timpanometrico:** premere sul tasto corrispondente (3).
- ✓ **Test dei riflessi acustici:** quando è necessario effettuare una modifica, premere i tasti **Ipsi** e **Contra** (4) così come i tasti per le diverse **frequenze** (5) per modificare gli stimoli predefiniti per i riflessi acustici. Un riquadro rosso / blu attorno allo stimolo indica che verrà presentato.

Avviare il test

- ✓ La misurazione parte non appena la sonda viene posizionata correttamente nell'orecchio per un test automatico. Per selezionare manualmente, premere il tasto **Avviare** ► o il tasto sulla **Sonda**.

Risultati

- ✓ I risultati (6) vengono presentati sotto forma di visualizzazione grafica o di tabella nei risultati del test del timpanogramma e/o dei riflessi acustici. *I criteri dei risultati sono basati sulle impostazioni.*

✓	Superato
✗	Nessuna risposta

7 GESTIONE DEI RISULTATI DEI TEST

- ✓ **Cancellare** : per cancellare i risultati del test.
- ✓ **Stampare** : per stampare direttamente i risultati. Se si stampa dal dispositivo verranno stampati tutti i risultati del test in una volta (ad esempio 226 Hz e 1000 Hz).
- ✓ **Trasferimento al PC** : per trasferire i dati al software del PC. È possibile trasferire solo i dati di una misura alla volta (ad esempio 226 Hz o 1000 Hz.).

Per ulteriori informazioni, chiedere al distributore locale o a MAICO Diagnostics GmbH, Sickingerstr. 70-71, 10553 Berlino, Germania, Tel.: +49 30 70 71 46-50 • Fax: +49 30 70 71 46-99 • E-mail: sales@maico.biz • Internet: www.maico.biz