

## 1 À PROPOS DE CE GUIDE RAPIDE



Ce guide rapide n'a pas pour vocation de remplacer le manuel d'utilisation. Il est obligatoire de lire la totalité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil ! Certaines des fonctions suivantes peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques choisis.



Visitez **easyTone.app** pour plus d'instructions et d'assistance :



### Logiciel easyTone Companion

Téléchargez le fichier Win ou le fichier de configuration OSX.

### Tutoriel de formation easyTone

Regardez de courtes vidéos d'instructions pour vous aider à l'utiliser.

## 2 SÉCURITÉ DES DONNÉES


Il est recommandé d'utiliser le paramètre de code d'accès de la tablette pour sécuriser les informations sur les sujets.

## 3 NAVIGATION ANDROID™

Barre de navigation de la tablette Android :

- Retour : Se déplacer en arrière dans l'historique des écrans précédemment visités.
- Accueil : Retourner à l'écran principal de la tablette.
- Commutateur de tâches : Afficher toutes les applications récemment ouvertes. Lancer ou fermer une application fonctionnant en arrière-plan.

## 4 CRÉER PROTOCOLE

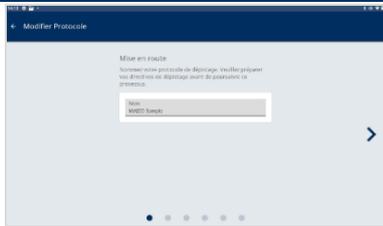

Dès la réception de la tablette, il est conseillé de créer un protocole de dépistage pour établir des critères de réussite/à refaire spécifiques à votre emplacement.

1. Sélectionnez le menu en haut à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez Gestion des protocoles dans la liste.
3. Sélectionnez **Ajouter un protocole.**
4. L'assistant de protocole guide l'utilisateur à travers chaque sélection.

## 5 SÉLECTIONNER UN EXAMINATEUR

Appuyez sur dans le coin supérieur droit de l'écran de démarrage. Sélectionnez un examinateur dans la liste et appuyez sur **Accepter**.

**REMARQUE** : Vous pouvez ajouter un nouvel examinateur dans **Menu** → **Paramètres** → **Examineurs**.

Appuyez sur pour ajouter un nouvel examinateur. Entrez le nom de l'examineur et appuyez sur **Enregistrer**.


## 6 ÉCRAN DE DÉMARRAGE

Il existe deux options pour le mode de dépistage, qui détermineront la manière dont l'**écran de démarrage** s'affiche dans l'application.

**REMARQUE** : Cette sélection est déterminée dans les paramètres. Aller à **Menu** → **Paramètres** → **Généraux** → **Mode de dépistage**

### Dépistage individuel :

Permet de tester un seul sujet et d'imprimer les résultats ou de les partager dans un e-mail. Il n'est pas possible de stocker les résultats dans l'application.

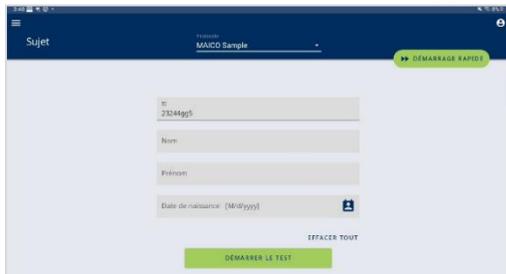

1. Saisissez les informations relatives au sujet dans les champs affichés. Un clavier s'affiche lorsque vous tapez dans le champ.
2. Sélectionnez **Démarrer le test** pour passer à l'écran de test.

### Liste de dépistage :

Utiliser avec le logiciel **easyTone Companion** pour télécharger une liste de dépistage et télécharger les résultats sur un PC.

ID	Nom	Prénom	Date de naissance	Autres informations	Résultat
21245	Campana	Cecilia	5/26/2000		
21452	Velasquez	Petra	5/11/2001		
55111	Christian	Sébastienne	2/14/2001		
15522	Blaise	Adrienne	1/3/2001		
52477	Proulx	Claude	12/13/2002		
98411	Wright	Prune	2/19/2002		
398145	Lane	Gisèle	2/20/2002		
51515	Cloé	Paul	5/1/2000		
84545	Chevalier	Aurone	5/6/2002		

1. Ouvrez le logiciel **easyTone Companion** sur le PC et suivez les instructions de connexion.
2. Téléchargez la liste de dépistage vers l'**application easyTone**.
3. Sélectionnez un sujet dans la **Liste de dépistage** dans l'application easyTone pour passer à l'écran de test.

**REMARQUE** : Sélectionnez **DÉMARRAGE RAPIDE** pour commencer le test sans aucune information sur le sujet. Les informations peuvent être ajoutées après le test.

## 7 ÉCRAN DE TEST



**REMARQUE :** L'écran de test peut avoir une apparence différente en fonction du protocole sélectionné.

### Protocole



Sélectionnez/confirmez le protocole dans le menu déroulant.

### Oreille à tester



L'écran de test démarre par défaut par l'**OREILLE DROITE**. Pour commencer le test dans l'oreille gauche, sélectionnez **OREILLE GAUCHE**.

### Habituation



L'habituation permet de s'entraîner avec un son élevé avant le dépistage. Appuyez sur < ou > pour définir le niveau d'habituation élevé, et le bouton bleu entre les flèches pour présenter le son d'habituation.

### Présenter le signal



Appuyez ici pour présenter le niveau du son de dépistage défini dans le protocole (le niveau de dépistage est affiché sous la fréquence).

### Enregistrer la réponse

Appuyez sur :



si le sujet ne répond pas au signal.



si le sujet répond au signal.

Après la sélection, présentez le son suivant. Le test passera immédiatement à l'écran **Résultat** dès que toutes les fréquences et les deux oreilles auront été testées.

### Arrêter le test



Appuyez ici pour arrêter le test prématurément et établir un résultat.




**Moniteur de bruit :** pour permettre la surveillance de l'activité du bruit pendant le dépistage et arrêter le processus de filtrage ou afin d'atténuer le bruit de la salle.



**Indicateur de réponse :** s'allume en vert lorsque le sujet appuie sur la touche de réponse du patient (accessoire optionnel).

## 8 ÉCRAN DES RÉSULTATS

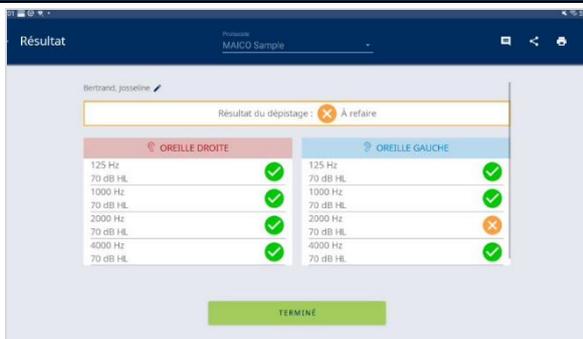

- L'écran **Résultat** fournit un résultat global **Réussite** ✓ ou **À refaire** ✗ ainsi que les résultats individuels pour chaque fréquence.
- Appuyez sur  si vous souhaitez ajouter un commentaire.
- Les résultats peuvent être imprimés sur une imprimante de réseau ou partagés par e-mail à partir des icônes situées en haut à droite de l'écran.
- Sélectionnez **Terminé** pour revenir à **l'écran de démarrage**.

**REMARQUE :** Si le mode **Liste de dépistage** est sélectionné, le résultat global est enregistré pour le sujet.