

1 SU QUESTA GUIDA RAPIDA



Con questa Guida rapida non si intende sostituire il manuale d'uso. La lettura dell'intero manuale d'uso prima dell'utilizzo del dispositivo è obbligatoria!
Alcune delle seguenti funzioni possono variare a seconda delle impostazioni personalizzate.

2 PREPARAZIONE AL TEST

Una stanza tranquilla è la cosa migliore per lo screening uditivo.

- ✓ Smettere di parlare, spegnere la TV e altre sorgenti sonore acustiche, chiudere la porta per evitare il rumore esterno.

È il momento giusto?


- ✓ Più si aspetta per sottoporre a screening un neonato, maggiore è la probabilità che il risultato sia **Pass (Superato)**. Evitare il test prima delle 12 ore dalla nascita.
- ✓ Lo screening riesce meglio quando il bambino è stato appena alimentato e dorme serenamente.

Applicare il tappino monouso sulla Sonda Standard OAE o sullo SnapPROBE™




- ✓ Assicurarsi che la sonda e tutte le sue parti siano in adeguate condizioni di pulizia.
- ✓ Scegliere un tappino monouso che si adatti al condotto uditivo del paziente.
- ✓ Applicare il tappino alla sonda.

Inserire la sonda con il tappino nell'orecchio

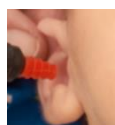

- ✓ Posizionare la sonda saldamente nel condotto uditivo del bambino.
- ✓ Assicurarsi che la sonda sia inserita abbastanza profondamente in modo che non esca troppo facilmente.

3 PREPARARE IL DISPOSITIVO

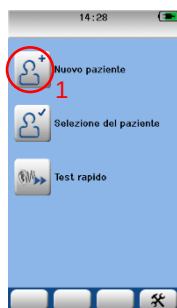


Accendere il dispositivo

- ✓ Premere il pulsante **Home** sull'easyScreen per accenderlo.

Aggiungere un nuovo paziente


- ✓ Toccare il pulsante **Nuovo paziente**  per aprire una schermata di inserimento dati (1).

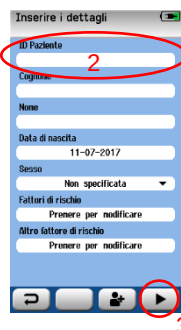

Immettere le informazioni sul paziente

- ✓ Toccare i campi per inserire i dati del paziente.
- ✓ È necessario immettere un ID paziente per salvare i dati dello stesso (2).
- ✓ Toccare il tasto funzione **Test**  quando i campi desiderati sono completati (3).

4 INIZIARE LO SCREENING

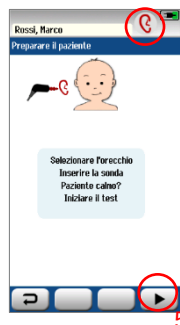

Scegliere l'orecchio

- ✓ Quando viene visualizzata la schermata del test, toccare il pulsante **Orecchio**  fino a visualizzare il simbolo dell'orecchio da esaminare. **Rosso = Destra - Blu = Sinistra** (4).

Il bambino è pronto?

- ✓ Aspettare a iniziare il test fino a quando il bambino non è stabile e calmo.

Iniziare lo screening


- ✓ Toccare il tasto funzione **Test**  per iniziare lo screening (5).

5 PROCEDURA DI SCREENING - CONTROLLO FITTING DELLA SONDA



- ✓ Il fitting della sonda nel condotto uditivo è controllato automaticamente dal sistema.
- ✓ Il testo nella barra di stato superiore descrive lo stato di fitting della sonda. Le barre di seguito indicano:
 - ✓ **Sigillo** - se la sonda si inserisce saldamente nel condotto uditivo.
 - ✓ **Stimolo** - se lo stimolo è adeguato.
 - ✓ **Rumore** - se esiste un rumore acustico eccessivo.
- ✓ Se alcuni di questi parametri non mostrano un segno di spunta verde a destra:
 - ✓ Controllare che la sonda sia posizionata saldamente nel condotto uditivo.
 - ✓ Controllare che il rumore nella stanza e quello prodotto dal paziente siano ridotti.
 - ✓ Quando tutti e 3 i parametri presentano un segno di spunta verde, il test passerà alla fase successiva.


6 PROCEDURA DI SCREENING - FASE DI MISURAZIONE

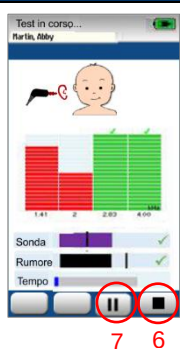

- ✓ Le barre verticali per ciascuna frequenza si riempiono di colore mentre il test avanza.
 - ✓ Le barre **Rosse** mostrano l'avanzamento dello screening per l'esame dell'orecchio **Destro**.
 - ✓ Le barre **Blu** mostrano l'avanzamento dello screening per l'esame dell'orecchio **Sinistro**.
 - ✓ Una barra verde con un segno di spunta mostra il passaggio di una banda di frequenza.
- ✓ Quando passano 3 frequenze, il risultato complessivo del test è **Pass' (Superato)**; il test si ferma e un simbolo verde ✓ appare sopra il grafico.
- ✓ Quando passano 60 secondi senza rilevare OAE (**Refer' (Non superato)**), il test si ferma e sullo schermo compare un simbolo ✗ arancione.
- ✓ Per forzare un arresto, selezionare il tasto funzione **Stop** (6). Verrà visualizzato il simbolo di un test incompleto (?).
- ✓ Per mettere in pausa la misurazione, selezionare il tasto funzione **Pausa** (7). Quindi riprendere quando si è pronti.

7 OPZIONI POST-TEST

Stampa etichetta

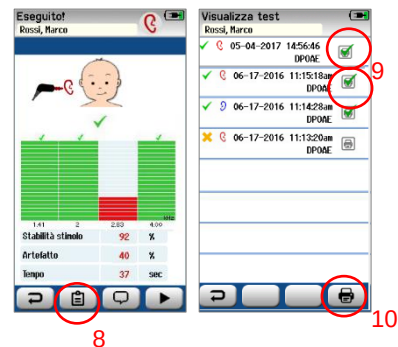

- ✓ Selezionare il pulsante **Elenco test** (8) per visualizzare l'elenco dei test eseguiti su quel paziente (8).
- ✓ Il test più recente per l'orecchio sinistro e destro è pre-selezionato (con segno di spunta) per la stampa. Può essere deselezionato e possono esserne scelti altri toccando l'icona della stampante nella riga del test (9).
- ✓ Dopo aver selezionato i test che si desidera stampare, selezionare il tasto funzione **Stampa** (10) (assicurarsi che la stampante sia accesa) (10).

Ritornare alla Home

- ✓ Premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata **Home** e iniziare la procedura per un nuovo paziente.

Trasferire a HearSIM™

- ✓ Collegare easyScreen al PC e avviare l'applicazione HearSIM™ per trasferire i dati del paziente e del test per l'archiviazione permanente. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di HearSIM™.