



## easyTymp™ Guide rapide

### Préparation de la mesure

Pour commencer, appuyez sur la touche flèche rouge ou bleue   pour allumer l'appareil.  
Si vous rangez l'easyTymp dans l'embase, il s'allume automatiquement après avoir sorti l'appareil de l'embase.

### Manipulation des embouts



Choisissez un embout de la taille appropriée dans l'ensemble d'embouts, selon la taille et la forme du conduit auditif et de l'oreille. Positionnez solidement l'embout sur l'extrémité de la sonde.


### Panneau de commande



Touches de fonction :

- Boutons du haut : Le fonctionnement des touches est associé aux fonctions indiquées sur l'écran au-dessus de la touche de fonction individuelle. (p. ex. Protocole, Patient, Stop)

  Touches flèches : Allumez l'easyTymp en appuyant sur la touche flèche droite ou gauche.  
Éteignez l'easyTymp en appuyant sur les deux touches en même temps.

 Boutons haut et bas : Parcourez le menu des différents paramètres easyTymp et des protocoles de test ou faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas.

### Démarrer le test

L'easyTymp démarre toujours sur l'écran de test, prêt à commencer une mesure. Il utilise le même protocole que celui précédemment utilisé.

#### 03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

**Protocole**

**Patient**

**Stop**

Lorsque l'on accède à l'écran Test, la deuxième ligne indique le nom du protocole qui est utilisé.

Ouvre l'écran avec les protocoles de test disponibles.


À partir de cet écran, vous pouvez enregistrer les données vers un patient existant ayant pu être téléchargé à partir de votre base de données ou vers un nouveau patient.

Appuyez sur Stop pour terminer la mesure.

L'easyTymp vous dirige automatiquement vers l'écran Terminé lorsqu'il a terminé les tests.

# easyTymp™ Guide rapide


## Affichages

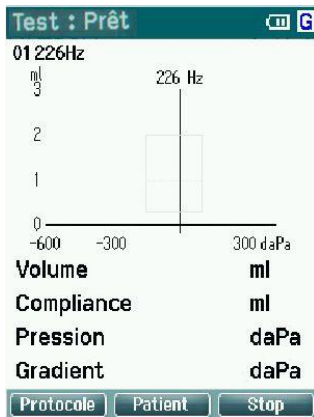

Appuyez sur Protocole pour charger un autre protocole. Appuyez sur Patient pour afficher la liste des patients.




Faites défiler vers le haut/bas pour choisir le test et commencez la mesure en appuyant sur Sélect.

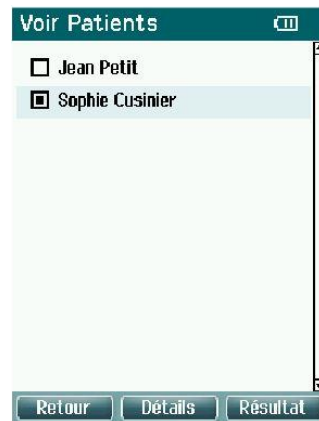


Faites défiler vers le haut/bas pour sélectionner un patient. Appuyez sur Résultat pour afficher les résultats enregistrés.

## Administration de la mesure


L'easyTymp vous dirige automatiquement vers l'écran Terminé lorsqu'il a terminé les tests. À partir de l'écran Terminé, les mesures des deux oreilles peuvent être examinées, imprimées et/ou enregistrées.

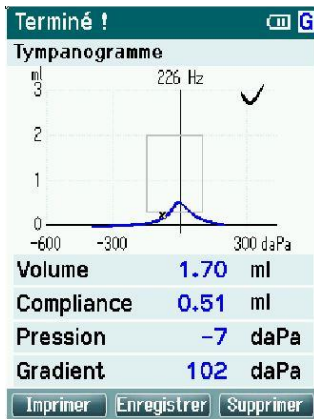

Faites défiler vers le bas pour afficher les résultats réflexes.

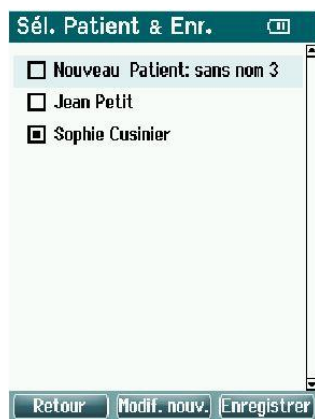

Enregistrez les données vers un patient existant ou vers un nouveau patient.

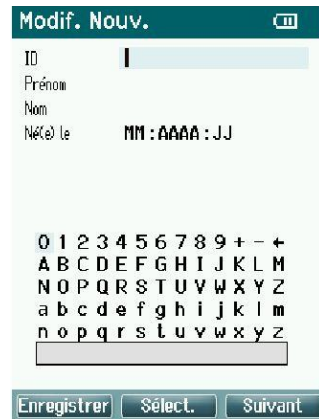

Les boutons haut et bas déplacent la sélection du clavier d'un caractère vers le haut ou le bas. Lors de la modification de la date de naissance, le bouton haut et bas modifie la valeur numérique