

1 À PROPOS DE CE GUIDE RAPIDE



Ce guide rapide n'a pas pour vocation de remplacer le manuel d'utilisation. Il est obligatoire de lire la totalité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil !
Certaines des fonctions suivantes peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques choisis.

2 PREPARATION AU TEST

Une pièce silencieuse est préférable pour un dépistage d'audition.

- ✓ Arrêtez les conversations, arrêtez les téléviseurs et autres sources de bruit acoustique, fermez la porte pour exclure le bruit extérieur.

Est-ce le bon moment ?

- ✓ Plus vous pouvez attendre pour effectuer le dépistage sur un nouveau-né, plus il y aura de chances d'obtenir un résultat « **Réussite** ». Évitez de tester dans les 12 heures qui suivent la naissance.
- ✓ Le dépistage est particulièrement efficace quand le bébé vient d'être allaité et dort confortablement.

Installer l'embout sur la sonde standard de l'OAE ou sur le SnapPROBE™



- ✓ Assurez-vous que la sonde et tous ses composants sont dans un état propre.
- ✓ Choisissez un embout jetable adapté au conduit auditif du patient.
- ✓ Connectez l'embout à la sonde.

Insérez la sonde avec l'embout dans l'oreille



- ✓ Placez fermement l'embout dans le conduit auditif du bébé.
- ✓ Vérifiez que l'embout est suffisamment enfoncé pour ne pas tomber trop facilement.

3 PREPAREZ L'APPAREIL



Allumez l'appareil

- ✓ Appuyez sur le bouton **marche-arrêt** de l'easyScreen pour l'allumer.

Saisissez un nouveau client

- ✓ Touchez le bouton **Nouveau patient** pour ouvrir un écran de saisie de données (1).



Saisissez les informations du patient

- ✓ Touchez les champs pour saisir les informations du patient.
- ✓ Vous devez saisir un ID patient pour enregistrer le patient (2).
- ✓ Touchez la touche de fonction **Test** une fois que les champs souhaités ont été remplis (3).

4 DEBUTEZ LE DEPISTAGE



Choisissez l'oreille

- ✓ Quand l'écran de test s'affiche, touchez le bouton **Oreille** jusqu'à ce qu'il affiche le symbole de l'oreille que vous souhaitez tester. **Rouge = Droite. Bleu = Gauche.** (4).

Le bébé est-il prêt ?

- ✓ Attendez pour commencer le test que le bébé soit installé confortablement et calme.

Débutez le dépistage


- ✓ Touchez la touche de fonction **Test** pour commencer le dépistage (5).

5 PROCESSUS DE DEPISTAGE – CONTROLE DE L'ADAPTATION DE LA SONDE



- ✓ L'adaptation de la sonde dans le conduit auditif est vérifiée.
- ✓ Le texte dans la barre d'état supérieure décrit l'état de l'adaptation de la sonde. Les barres inférieures indiquent :
 - ✓ **Sceau** – si la sonde est fermement positionnée dans le conduit auditif.
 - ✓ **Stimuli** – si le stimulus est adéquat.
 - ✓ **Bruit** – s'il y a un bruit acoustique excessif.
- ✓ Si certains paramètres ne sont pas accompagnés d'une coche verte :
 - ✓ Vérifiez si la sonde est fermement positionnée dans le conduit auditif.
 - ✓ Vérifiez si le bruit dans la pièce et provenant du patient peut être réduit.
- ✓ Quand les 3 paramètres ont une coche verte, le test passe à la phase suivante.



6 PROCESSUS DE DEPISTAGE – PHASE DE MESURE

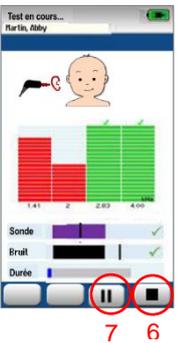

- ✓ Les barres verticales pour chaque fréquence se remplissent de couleur à mesure de la progression du test.
 - ✓ Les barres **rouges** reflètent la progression du dépistage pour un test de l'oreille **droite**.
 - ✓ Les barres **bleues** reflètent la progression du dépistage pour un test de l'oreille **gauche**.
 - ✓ Une barre verte surmontée d'une coche indique une bande de fréquence réussie.
- ✓ Quand 3 fréquences ont réussi, le test est globalement réussi (**Réussite**), il s'arrête et un symbole vert ✓ apparaît au-dessus du graphique.
- ✓ Après 60 secondes sans OAE détecté (**Référer**), le test s'arrête et un symbole orange X s'affiche au-dessus du graphique.
- ✓ Pour forcer un arrêt, sélectionnez la touche de fonction **Stop** (6). Le symbole pour un test incomplet (?) s'affiche.
- ✓ Pour interrompre temporairement la mesure, sélectionnez la touche de fonction **Pause** (7). Puis reprenez le test quand vous êtes prêt.

7 OPTIONS APRES LE TEST

Imprimez l'étiquette

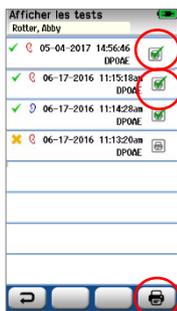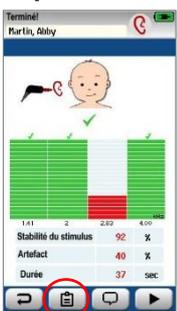

- ✓ Sélectionnez le bouton **Liste de tests** (8) pour afficher une liste des tests effectués pour ce patient (8).
- ✓ Le test le plus récent pour l'oreille gauche et l'oreille droite est présélectionné (coché) pour l'impression. Mais il peut être désélectionné et remplacé par d'autres en touchant l'icône de l'imprimante sur la ligne du test (9).
- ✓ Après avoir sélectionné les tests que vous voulez imprimer, sélectionnez le bouton **Imprimer** (10) (vérifiez que l'imprimante est allumée) (10).

Revenez à l'accueil

- ✓ Appuyez sur le bouton **marche-arrêt** pour revenir à l'écran **d'accueil** et recommencer la procédure pour un nouveau patient.

Passez à HearSIM™

- ✓ Connectez easyScreen à votre PC et lancez l'application HearSIM™ pour transférer le patient et les données de test en vue de les stocker définitivement. Consultez le manuel d'utilisation HearSIM™ pour obtenir plus d'informations.