

Brève description des fonctions du clavier standard et de la souris PC

F1 = non occupé
 F2 = Commutation son/parole (MA 33 Parole uniquement)
 F3 = Commutation gauche/droite
 F4 = Bruit d'occlusion du canal droit activé/désactivé

F5 = Conduite d'air
 F6 = Conduction osseuse (version KL, SISI uniquement)
 F7 = inoccupé
 F8 = tonalité d'impulsion activée/désactivée

F9 = Bruit d'occlusion Canal gauche On/Off
 F10 = inoccupé
 F11 = UCL + MCL (switch)
 F12 = Fonctionnement du disjoncteur/générateur de tonalité

TAB = Commutation droite/gauche

Ctrl = Interrupteur/Générateur de tonalité - droite

R = oreille droite
 L = liens Ohr
 B = ambigu (si activé)

Alt + B = Programm beenden
 Alt + E = Définir Alt +
 R = Usinage Alt + T
 = Test d'écran
 Alt + U = Marque non sécurisé
 Seuil

barre d'espace = interrupteur/générateur de tonalité de la page active
 Alt + L = Supprimer la mesure (GDT&MAICO)
 Alt + N = Neu (NOAH)
 Alt + D = charge existante mesure
 Alt + S = Enregistrer la mesure

Stocke le courant
 Lecture

Interrupteur/générateur de tonalité

Sélection du niveau et de la fréquence

Pression = expression instantanée

? = marque un seuil d'audition incertain
 Changement de niveau contre-oreille

Pos1 = Revenir à 1 kHz

Changement de niveau contre-oreille
 Del = supprimer la dernière valeur mesurée

Tube de mesure à changement de niveau
 SISI – Test (version SISI)
 S = Stopp (joueur)
 P = Début (joueur)
 E = Ende (nur SISI-Test)

Commutation de fréquence

Les valeurs mesurées prennent le dessus N = non entendu
 Ctrl = Interrupteur/Générateur de tonalité gauche